

Häufig gestellte Fragen



**DIE SCHWELLKÖRPERIMPLANTATE DER PRODUKTREIHE AMS 700™
ZUR BEHANDLUNG VON EREKTLER DYSFUNKTION**

Häufig gestellte Fragen zum Verfahren

Wird das Verfahren stationär durchgeführt?

Normalerweise ja; diese Entscheidung wird jedoch zwischen Ihnen und Ihrem Urologen getroffen.

Wie lange dauert die Schwellkörperimplantat-OP?

Die Implantation eines Schwellkörperimplantats erfordert einen operativen Eingriff, der normalerweise zwischen 30 Minuten und zwei Stunden dauert.

Ist es erkennbar, dass ich ein Implantat trage?

Nach der Platzierung ist das Implantat nicht mehr erkennbar. Es befindet sich vollständig im Körper. Es wird nicht zu bemerken sein, dass Sie ein Schwellkörperimplantat tragen – auch nicht im Umkleieraum – es sei denn, Sie sagen es.

Ist der Eingriff sehr schmerzhaft?

In der Anfangszeit nach der Operation und beim ersten Gebrauch des Implantats können Sie evtl. Schmerzen oder Beschwerden an der Operationsstelle verspüren. In den meisten Fällen klingen die Schmerzen einige Wochen nach der Operation ab, es sind jedoch auch einige Fälle von chronischen Schmerzen aufgetreten.¹

Wie lange muss ich nach der Operation warten, bevor ich das Implantat verwenden kann?

Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, wann Sie das System verwenden können. Bei Schwellkörperimplantaten empfehlen die meisten Ärzte eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen vor dem Geschlechtsverkehr.¹

Ist der Aufdehnprozess beim AMS 700 schmerzhaft?

Um ein auffüllbares AMS-Implantat aufzudehnen, drücken Sie den Pumpballon im Skrotum zusammen. Dadurch wird Flüssigkeit in die Zylinder im Penis geleitet. Dies erfordert eine gute manuelle Geschicklichkeit, sollte aber keine Schmerzen bereiten. Wenn Sie Schmerzen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.¹

Sind Schwellkörperimplantate von Boston Scientific MRT-kompatibel?

Implantate von Boston Scientific sind bedingt MRT-tauglich, d. h. ein Patient mit diesem Implantat kann unter bestimmten Bedingungen gescannt werden, jedoch nicht alle. Wenden Sie sich bitte an Ihren Urologen.

Häufige Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen sollten

Was muss ich vor dem Eingriff beachten?

Was sind die Risiken der Operation?

Wie zufrieden sind die Patienten mit den Ergebnissen dieses Verfahrens?

Welche möglichen Nebenwirkungen können auftreten?

Kann ich nach dem Eingriff selbst nach Hause fahren?

Was muss ich tun, um eine ordnungsgemäße Heilung zu gewährleisten?

Weitere Ressourcen

Alltag mit dem Implantat

Wenn Sie mehr erfahren möchten oder Fragen dazu haben, wie es ist, mit einem Implantat zu leben, besuchen Sie www.urologymatters.com.



Bei Fragen können Sie sich auch jederzeit vor oder nach dem Eingriff an Ihren Arzt wenden.

1. Patientenhandbuch für das au üllbare Schwellkörperimplantat der Produktreihe AMS 700™ mit MS Pump.
American Medical Systems, Inc. 2019.

Alle erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen diese Produkte ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der Packungsbeilage und Etikettierung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Die abgebildeten Produkte werden ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN gezeigt und sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zugelassen oder dürfen nicht verkauft werden. Dieses Material ist nicht zur Verwendung in Frankreich vorgesehen.

Produkt nur im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erhältlich.

Informationen über die Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder dem Kundenservice.

Alle Abbildungen sind das Eigentum von Boston Scientific. Alle Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MH-1086002-AA.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2025 Boston Scientific Corporation
oder deren Tochterunternehmen.
Alle Rechte vorbehalten.